



תנאי משלוח בדיקות מעבדה חיצונית

שם בדיקה	סוג מבחנה	דרישות מיוחדות / הערות	כמות הדגימה (מינימום)*
המטולוגיה			
CBC ספירת דם	EDTA (פקק סגול)		1.5 מ"ל
משטח דם בלבד	משטח לא צבוע או דם ב-EDTA		
בדיקה לקביעת סוג דם	EDTA (פקק סגול)		0.5 מ"ל
סלייד אגלוטינציה	EDTA (פקק סגול)		0.3 מ"ל
התאמת דם	EDTA (פקק סגול)		2 מ"ל
ספירת אוטומטית לרטיקולוציטים או משטח ניו מתילן בלו	EDTA (פקק סגול)		0.5 מ"ל
שבירות אוטומטית של אריתרוציטים	EDTA (פקק סגול)	-בדיקה איכותית בלבד	1.5 מ"ל
ביוכימיה			
פאנל ביוכימי מלא פאנל ביוכימי חלקי מדד ביוכימי בודד	סרום (פקק אדום / צהוב)	רצוי בקירור (4 מ"צ)	2.5 מ"ל
ליפאז	סרום (פקק אדום / צהוב)		1.5 מ"ל
לקטאט	פלואוריד (פקק אפור)		1 מ"ל
חומצות מרה vetscan	סרום (פקק אדום / צהוב) או הפארין (פקק ירוק)		1.5 מ"ל
BHBA	סרום (פקק אדום / צהוב)		1 מ"ל
פרוקטוזאמין, HbA1C	סרום (פקק אדום / צהוב)		1 מ"ל
אמוניה	הפארין (פקק ירוק)	תיאום הגעה מראש מול המעבדה מילוי מבחנת הפארין עד לואקום ואטימתה משלוח בתנאי קירור (4 מ"צ) הגעה למעבדה תוך 30 דק' מזמן נטילת הדם	1.5 מ"ל
כולינאסטראז	סרום (פקק אדום)		1.5 מ"ל
טרופובין T	סרום (פקק אדום)		1.5 מ"ל
CSF protein	סרום (פקק אדום)	-בתיאום עם המעבדה בלבד	0.5 מ"ל
גלוקוז בגלוקומטר	EDTA (פקק סגול)	-הגעה תוך 15 דק' מנטילת הדם	
אלקטרוליטים	סרום (פקק אדום/צהוב) הפארין (פקק ירוק)		1 מ"ל (פקק אדום / צהוב) או 0.5 מ"ל (פקק ירוק)
גזים בדם	מזרק שטוף בהפארין	תיאום הגעה מראש מול המעבדה מילוי מזרק שטוף בהפארין, אטימה מאוויר משלוח בתנאי קירור (4 מ"צ) הגעה תוך 3 שעות מזמן נטילת הדם	0.5 מ"ל
הורמונים			
קורטיזול	סרום (פקק אדום/צהוב)		2 מ"ל
T4	סרום (פקק אדום/צהוב)		2 מ"ל
תפקודי קרישה			
PT/PTT**	ציטראט (פקק תכלת)	רצוי לסרכז ולהפריד פלסמה תוך 30 דקות מהאיסוף ולשלוח בקירור (4 מ"צ)	לפי סימון המבחנה
פאנל קרישה**	ציטראט (פקק תכלת)	הגעה תוך 4 שעות מזמן נטילת הדם	לפי סימון המבחנה
אנטיטרובין**	ציטראט (פקק תכלת)	רצוי לסרכז ולהפריד פלסמה רצוי לשלוח בקירור (4 מ"צ)	לפי סימון המבחנה
די דימר**	ציטראט (פקק תכלת)	הגעה תוך 4 שעות מזמן נטילת הדם	לפי סימון המבחנה
Buccal mucosal bleeding time (זמן דימום)		מחיר ללהב חד פעמי, הוראות שימוש באתר בית החולים / טלפונית	



בית החולים הווטרינרי Hospital Teaching Veterinary

פ.ד. 70-8099818, פקס: 70-8099899, טל: 00277, רחובות 21, ד.ת.

P.O Box 12 Rehovot 76100. Tel: +972-(0)3-9688588. Fax: +972(0)3-9604079

לפי סימון המבחנה	רצוי לסרכז ולהפריד פלסמה רצוי לשלוח בקירור (4 מ"צ) הגעה תוך 4 שעות מזמן נטילת הדם	ציטראט (פקק תכלת)	פיברינוגן**
נדרשים לפחות 2 מ"ל של דם מלא בציטראט יש להקפיד על הסימון במבחנות הנשלחות	תיאום הגעה מראש מול המעבדה משלוח בתנאי קירור (4 מ"צ) הגעה תוך שעתיים מזמן נטילת הדם. הבדיקה דורשת דם מלא בציטראט - אין לסרכז ולהפריד!	ציטראט (פקק תכלת)	** TEM – Thromboelastometry
סרולוגיה			
1.5 מ"ל (פקק אדום / צהוב) או 1 מ"ל (פקק סגול או ירוק)		סרום (פקק אדום / צהוב) EDTA (פקק סגול) הפארין (פקק ירוק)	FIV/FeLV
1 מ"ל		סרום (פקק אדום / צהוב) EDTA (פקק סגול) הפארין (פקק ירוק)	סרולוגיה קיט ארליכיה IgG
1 מ"ל		סרום (פקק אדום / צהוב)	סרולוגיה FIP קיט Coronavirus
כפית		צואה בכלי מתאים וסגור היטב	אנטיגן בצואה giarda-
1.5 מ"ל		סרום (פקק אדום / צהוב)	סרולוגיה ליישמניה
1.5 מ"ל		סרום (פקק אדום / צהוב)	סרולוגיה - כלמידיה/טוקסופלסמה /נאוספורה/לפטוספירה/ברוצלה
ציטולוגיה			
	עדיף לשלוח סליידים לא צבועים סליידים צבועים יש לשלוח נקיים משמן יש לציין בבירור מאיזה איבר נלקחה הדגימה ומדוע	סליידים בכלי אחסון מתאים	ציטולוגיה
5 מ"ל	רצוי בקירור (4 מ"צ)		אנליזת נוזל גוף (PCV/TS, ציטולוגיה)
	יש לתאם הגעה מראש עם המעבדה הערכת חלבון ב-CSF מתבצעת במבחנה שונה (סרום)	EDTA (פקק סגול)	ציטולוגיה CSF
	דגימת מח העצם נלקחת למזרק עם אנטיקואגולנט (EDTA), יש להעבירה מיד למשטחים	משטחים לא צבועים	ציטולוגיה - מח עצם
		משטח לא צבוע	מגרד עור צבוע
		משטח לא צבוע	משטח אוזן צבוע (עד 4 משטחים)
	לבדיקה איכות ציטולוגית משופרת המשמרת את צורת התאים טוב יותר לאחר הסרכז ובזמן מריחת החומר על המשטח	EDTA (פקק סגול)	ציטולוגיה בציטוספין (עבור דגימת נוזל גוף / BAL / שתן)
שתן / צואה			
5 מ"ל לפחות	רצוי בקירור (4 מ"צ)	מבחנת שתן	בדיקת שתן
1 מ"ל		מבחנת שתן	יחס חלבון לקריאטינין בשתן (UPC)
6 מ"ל		מבחנת שתן	מבחן אמוניום סולפאט למיגלובין בשתן
5 מ"ל		EDTA (פקק סגול)	משטח ציטולוגי ב - cytospin
כפית		צואה בכלי מתאים וסגור היטב	דם סמוי בצואה



Hospital Teaching Veterinary בית החולים הווטרינרי

ת. ד. 21, רחובות 00277, טל: 70-8099899, פקס: 70-8099818
P.O Box 12 Rehovot 76100. Tel:+972-(0)3-9688588, Fax: +972(0)3-9604079

*כמות הדם הדרושה בדגימה הינה כמות מינימאלית לביצוע הדגימה המבוקשת בלבד.
במידה ונדרשות מספר בדיקות מאותה המבחנה (למשל – CBC, שבירות אוסמוטית
ואגלוטינציה), יש להוסיף את הכמות הדרושה לכל בדיקה למבחנה.
**בכל בדיקות תפקודי הקרישה – חשוב לוודא שאין במבחנה קרישי דם!